

USE:

- Inflammation of plantar aponeurosis,
- Peroneal nerve injury,
- Post-operative conditions of shin and foot.

Rozmiar	Shoe size (men)	Shoe size (women)
S – M	39 – 42,5	37,5 – 42,5
L - XL	43 - 49	43 - 48

KONSERWACJA:

Przetrzeć mokrą szmatką, nie używać silnych detergentów, suszyć z dala od sztucznych źródeł ciepła.

SKŁAD MATERIAŁOWY:

The frame is made of polypropylene. The insert is made of a foam of open cells brushed nylon. Without Claretton Dr.



Instrukcja używania Instructions for use

OVATION HYBRID NIGHT SPLINT

ORTEZA NA OPADAJĄCĄ STOPE / FOOT-DROP ORTHOSIS

Numer katalogowy / Catalogue Number:	OV3001
--------------------------------------	--------

**Producent/Manufacturer:**

Ovation Medical
5155 Clareton Dr.
Agoura Hills, CA. 91301
800 403-6466
www.ovationmed.com

Dystrybutor / Distributor:


Mdh sp. Z o.o.,
Ul. Maratońska 104, 94-007 Łódź
Tel. +48 426 748 384
www.mdh.pl, www.qmedbymejra.pl

Wydanie 15.09.2021
Edition 15.09.2021

INSTRUKCJA UŻYWANIA

OVATION HYBRID NIGHT SPLINT - Orteza na opadającą stopę

Odepnij wszystkie pasy.

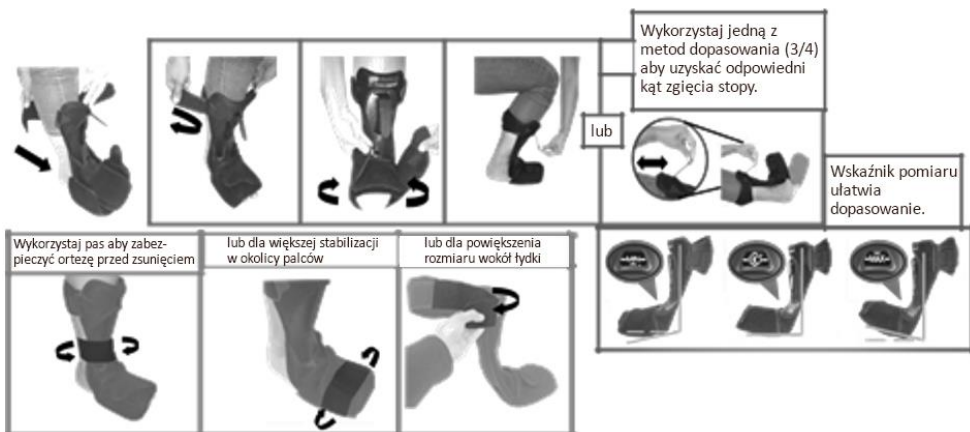

UWAGA! Orteza powinna być zawsze stosowana zgodnie z zaleceniami lekarza lub fizjoterapeuty. Przed użyciem ortozy należy szczególnie przeczytać instrukcję obsługi. Jeśli podczas użytkowania ortozy odczuwasz dyskomfort, pojawia się opuchlizna lub podrażnienia skóry należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub fizjoterapeutą. The Hybrid Night Splint nie jest przeznaczony do długotrwałego korzystania.

ZASTOSOWANIE:

- Zapalenie rozciągniętego podszewowego,
- Porażenie nerwu strzałkowego,
- Stany pooperacyjne prostowników łydki i stopy.

PRZECIWSKAZANIA:

- Żyłki kończyny dolnej,
- Stany zapalne i podrażnienia skóry w obrębie działania ortozy,
- Obrzęki łydki i stopy,
- Stopa cukrzycowa,
- Wady wrodzone stóp oraz utrwalone deformacje,
- Spastyczność,

Rozmiar	Rozmiar buta (mężczyźni)	Rozmiar buta (kobiety)
S – M	39 – 42,5	37,5 – 42,5
L - XL	43 - 49	43 - 48

KONSERWACJA:

Przetrzeć moką szmatką, nie używać silnych detergentów, suszyć z dala od sztucznych źródeł ciepła.

SKŁAD MATERIAŁOWY:

Rama wykonana z polipropylenu. Wkładka wykonana z pianki o otwartych komórkach ze szczotkowanego nylonu. Bez dodatku lateksu.




Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się ze swoim przedstawicielem.

INSTRUCTIONS FOR USE

OVATION HYBRID NIGHT SPLINT - Foot-drop orthosis

BEGIN Unfasten ALL straps.

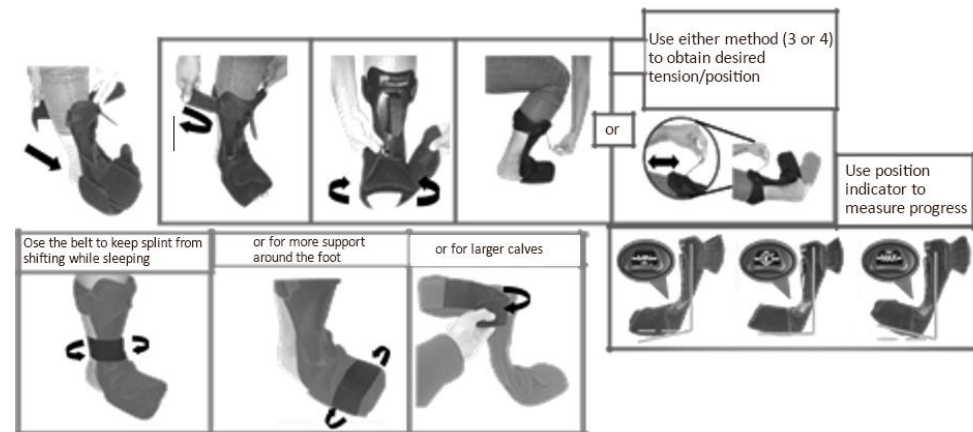

Uses for accessory strap are not limited to these options. Patient can customize use of strap as needed or as directed by your health care provider.

CAUTION:

The Hybrid Night Splint is not intended for continuous walking. Please consult your health care provider for specific instructions. In the event of discomfort or numbness of any kind when using this product, consult your health care provider immediately. Do not pull strap too tightly.