

Instrukcja używania
Instructions for use

STABILIZATOR NADGARSTKA

WRIST BRACE

Numer katalogowy / Catalogue Number:	PHAF02
Basic UDI-DI:	59017804PHAF02HH



Producent / Manufacturer:

Mdh sp. Z o.o.,
Ul. Maratońska 104, 94-007 Łódź
Tel. +48 426 748 384
www.mdh.pl, www.qmedinfo.pl

Wydanie 27.10.2021
Edition 27.10.2021

Qmed[®]
BY MEYRA



INSTRUKCJA UŻYWANIA

Stabilizator nadgarstka

Stabilizator stawu nadgarstkowego marki Qmed Pharma nadaje się zarówno do celów sportowych – chroni i usztywnia nadgarstek, jak i do celów rehabilitacyjnych – pomaga w leczeniu uszkodzonego lub nadwyrężonego stawu nadgarstkowego.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA:

- Przeciążenie wynikające z obciążeń wysiłkowych.
- Zmniejszenie dolegliwości bólowych poprzez kompresję stawu.
- Profilaktyka występowania urazu.
- Wzmocnienie aparatu więzadłowego stawu nadgarstkowego.

INSTRUKCJA ZAKŁADANIA:

- Opaskę naciągnąć od dołu na wysokość nadgarstka.
- Nie stosować bezpośrednio na rany lub uszkodzoną skórę.
- Stosowanie opaski skonsultować z lekarzem.

KONSERWACJA:

Prać ręcznie w temp. 40°C z dodatkiem delikatnych środków piorących np.: dla włókien syntetycznych. Nie prasować, nie chlorować, suszyć w stanie luźnym.



WYRÓB WIELOKROTNEGO UŻYCIA

DOPASOWANIE ROZMIARU:

Rozmiar	S	M	L	XL
Obwód nadgarstka (cm)	15 – 16	17 – 18	19 – 20	21 - 22

OSTATECZNĄ DECYZJĘ DOTYCZĄCĄ ZASTOSOWANIA I WYBORU ZAOPATRZENIA PODEJMUJE LEKARZ SPECJALISTA.

INSTRUCTIONS FOR USE

Wrist brace

The Qmed Pharma wrist brace is suitable for both sports purposes - it protects and immobilizes the wrist joint, and for rehabilitation purposes - it helps in the treatment of damaged or strained- wrist joint.

INDICATIONS FOR USE:

- Strain resulting from exercise loads.
- Reduction of pain by compressing the joint.
- Prevention of injuries.
- Strengthening of the ligamentous system of the wrist joint.

HOW TO PUT ON THE BRACES:

- Pull the brace over the wrist.
- Do not put it directly onto wounds or damaged skin.
- Consult a physician regarding the use of the brace.

MAINTENANCE:

Hand wash at 40°C with mild detergents, e.g. for synthetic fibres. Do not iron, do not chlorinate, dry loose.



REUSABLE PRODUCT.

SIZE SELECTION:

Size	S	M	L	XL
Wrist circumference (cm)	15 – 16	17 – 18	19 – 20	21 - 22

THE FINAL DECISION REGARDING THE APPLICATION AND SELECTION OF EQUIPMENT IS MADE BY A SPECIALIST PHYSICIAN.