

Motive

Orteza stawu kolanowego otwarta

Instrukcja użytkownika

Wydanie: ŁM02.2016

Qmed®

Zastosowanie

Motive jest ortezą tzw. typu otwartego o szerokim zastosowaniu terapeutycznym. Wspomaga proces leczenia i rehabilitacji w przypadku urazów i dysfunkcji stawu kolanowego i jego okolicy, w stanach nie wymagających opatrunku gipsowego lub w okresie doleczenia po zdjęciu unieruchomienia stałego.

Wskazania

- Podostre i przewlekłe zespoły bólowe związane z przeciążeniami i mikrourazami aparatu więzadłowo-mięśniowego.
- Choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego i związana z nią niestabilność stawu kolanowego w płaszczyźnie strzałkowej.
- Stabilizacja po zabiegach operacyjnych w końcowej fazie leczenia czynnościowego (doleczenie).
- Urazy i dysfunkcje bez konieczności unieruchomienia stawu (urazy więzadeł pobocznych-dooleczenie).

Przeciwwskazania

- Stany wymagające unieruchomienia gipsowego
- Trudno gojące się rany i owrzodzenia
- Znaczne deformacje kości (niemożność dostosowania ortozy do stawu)
- Żylaki kończyny dolnej

Opis produktu

Produkt jest typem ortozy otwartej. Tutor został wykonany z nowoczesnej dzianiny dystansowej AirX, elastycznej i oddychającej, posiada wcięcie na rzepkę wykończone lamówką i zamknięty dół podkolanowy. Boczna stabilizację stawu zapewniają stalki z policentrycznymi zegarami umieszczone w zamkniętych tunelach, ale częściowo odkrytych w miejscu zegara, co zapobiega marszczeniu się ortozy. Stalki zapobiegają przed niekontrolowanym przeprostem w stawie kolanowym. Dodatkową stabilizację zapewnia system poprzecznych pasków dociągowych. Pasy są zapinane o przeciwnym kierunku przebiegu w części górnej (udowej) i dolnej (goleniowej). Możliwość ustawienia kątów: Zgięcia 90°, 75°, 60°, 45° oraz Wyprost: 0°, 20°, 30°, 40°.

Instrukcja zakładania

1. Rozpiąć ortezę.
2. Założyć na kończynę dolną, zaczynając od tylnej powierzchni tak, aby dopasować wypełnienie dołu podkolanowego.
3. Zapiąć ortezę na rzepy na przedniej powierzchni kończyny dolnej z uwzględnieniem wcięcia na rzepkę.
4. Naciągnąć i zapiąć poprzeczne paski dociągowe w części górnej, następnie dolnej ortozy i dostosować siłę docisku do własnych potrzeb.

Rozmiar	Obwód stawu kolanowego* [cm]
1	36 -39
2	40-43
3	44-48
4	49-54
5	55-60

* obwód stawu kolanowego mierzony 15 cm powyżej środka kolana

Przed praniem wyjąć stalki.



UWAGA

Nie przestrzeganie właściwej higieny osobistej, stosowanie niewłaściwych środków piorących może spowodować otarcia lub inne dolegliwości związane ze zwożoną potliwością i rozwojem flory bakteryjnej. Nie należy stosować ortozy na żele i maści rozgrzewające. Należy pamiętać, że niewyplukane resztki detergentu mogą powodować podrażnienia skóry oraz uszkadzać materiał z którego wykonano wyrób.

OSTATECZNĄ DECYZJĘ DOTYCZĄCĄ ZASTOSOWANIA I WYBORU ZAOPATRZENIA PODEJMUJE LEKARZ SPECJALISTA

WYTWÓRCA: mdh sp. z o.o., 90-349 Łódź, ul. Tymienieckiego 22/24, tel. +48 42 6748384, fax +4842 6365221, www.mdh.pl