

Ważne informacje



- Podczas szlifowania lub cięcia należy chronić oczy oraz zakrywać nos i usta.
- Orteza nie może być poddawana obróbce termicznej.
- Podeszwa ortezy i inne elementy konstrukcyjne nie mogą mieć otworów ani perforacji, ponieważ mogłyby one uszkodzić włókna i zmniejszyć wytrzymałość elementu.

Zawartość zestawu


- Orteza stawu skokowego i stopy Easy Walk®
- Pasek z zapięciem na rzep
- Wyściółka 3 szt.
- Rzepy okrągłe samoprzylepne 8 szt.
- Dwustronne rzepy okrągłe 2 szt.
- Instrukcja użytkowania
- Instrukcja dopasowania




Dopasowanie ortezy w 10 prostych krokach




1. Wykonanie obrysu podeszwy ortezy Obrys podeszwy ortezy musi pasować do wnętrza podeszwy buta. Wybór odpowiedniego rozmiaru ortezy jest bardzo ważny. Następnie wyjmij wkładkę z buta i wykonaj obrys wkładki na ortezie. Podczas regulowania długości podeszwy połączenie między podeszwą a sprężyną grzbietową nie może znajdować się zbyt blisko wewnętrznej kości skokowej.

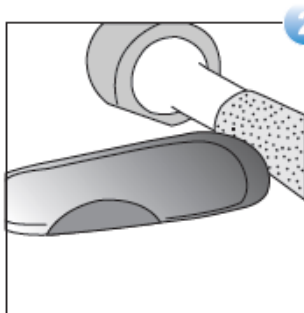


2. Szlifowanie podeszwy Oszlifuj podeszwę ortezy zgodnie z zaznaczonym obrysem na szlifierce papierem ściernym o średniej ziarnistości (60).

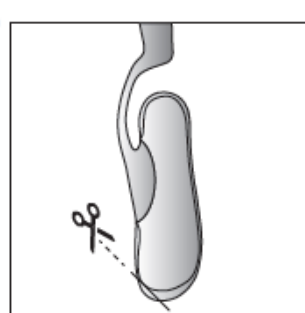


2a. lub przycięcie nożyczkami Podczas regulowania szerokości podeszwy zeszlifuj lub przytnij zewnętrzną krawędź podeszwy do wymaganej szerokości, aby wewnętrzna część podeszwy nie uciskała stopy. Jeśli podeszwa wymaga dalszej regulacji szerokości, zeszlifuj lub przytnij ją zarówno z zewnętrznej, jak i wewnętrznej strony.

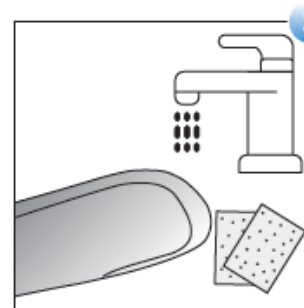

3. Krawędzie podeszwy powinny być gładkie Krawędzie przyciętej ortezy mogą być ostre i przeciąć but lub spowodować obrażenia. W związku z tym należy je zeszlifować i wygładzić pod strumieniem wody przy użyciu wodoodpornego papieru ściernego o ziarnistości 150.

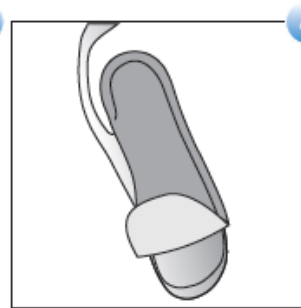


4. Nakrycie części podeszwy W zależności od potrzeb pacjenta zaleca się pokrycie części podeszwy specjalnym materiałem lub wkładką poprzez przyklejenie ich do podbicia podeszwy.

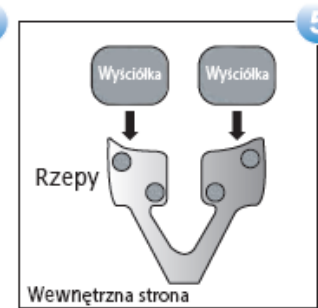


5. Montaż miękkiej wyściółki Przymocuj dwie części miękkiej wyściółki do przyklejonych rzepów okrągłych po wewnętrznej stronie uchwytów na łydki.




6. Montaż dwóch rzepów okrągłych na pasku Przymocuj dwa rzepy okrągłe na zewnętrznej powierzchni obu uchwytów łydki.

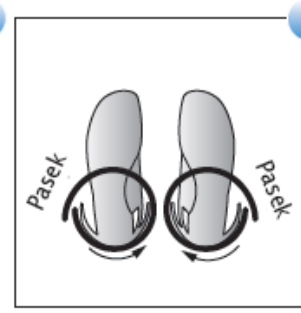


7. Zakładanie paska mocującego Załóż pasek na rzepy okrągłe, zaczynając od strony bocznej i owiń go wokół łydki od tyłu w kierunku strony przysiódkowej.

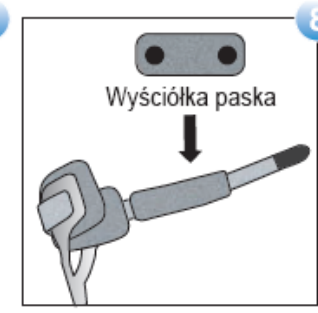

8. Wyściełanie paska Zamocuj dwa rzepy okrągłe dwustronne na wyściółce paska i przymocuj je do paska z przodu nogi, aby zmniejszyć nacisk paska.

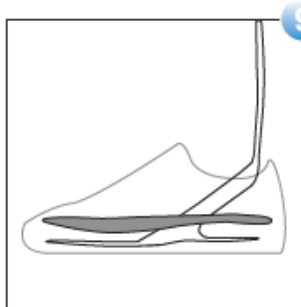

9. Włożenie ortozy do buta
Wyjmij wkładkę z buta, włóż ortezę, a następnie włóż wkładkę z powrotem. Orteza nie powinna przesuwać się w bucie. Najlepiej pasuje do butów na obcasie 10–20 mm.

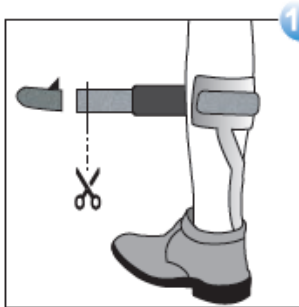

10. Regulacja paska i zapięcie ortozy
Pacjent powinien założyć but razem z ortezą. Zmierz i wyreguluj długość paska, przycinając go nożyczkami. Przymocuj rzep na końcu paska i zapnij ortezę.

Pacjent powinien zostać poinstruowany, jak nosić ortezę typu AFO

Należy szczegółowo wyjaśnić instrukcje użytkowania. Pacjent powinien otrzymać wydrukowany dokument dołączony do produktu i należy mu wyjaśnić, jak znaleźć wersję elektroniczną w różnych językach na stronie internetowej Ortho Baltic, skanując kod QR na etykiecie produktu lub opakowaniu.

Dostępne części zamienne do wymiany

Pasek i zestaw wyściółek art. GSTR10A rozmiar uniwersalny	Zestaw wyściółek art. GPAD12A rozmiar uniwersalny
<p>Wyściółka Wyściółka Wyściółka paska Rzep Pasek z zapięciem na rzep</p>	<p>Wyściółka Wyściółka Wyściółka paska</p>
Welurowa osłona podeszwy, czarna art. GSC 10	
GSC10=LXS	GSC10=RXS
GSC10=LS	GSC10=RS
GSC10=LM	GSC10=RM
GSC10=LL	GSC10=RL
GSC10=LXL	GSC10=RXL

**Aby uzyskać więcej informacji,
należy skontaktować się z
dystrybutorem lub producentem.**

DYSTRYBUTOR:

mdh Sp. z o.o.
ul. Maratońska 104
94-007 Łódź
tel. 42 636 81 44
mdh.ortopedia@meyragroup.com
www.mdh.pl

PRODUCENT:

Ortho Baltic UAB
Taikos pr. 131 A, LT-51124
Kowno, Litwa
+370 37 473970
info@orthobaltic.lt
www.orthobaltic.eu

Obowiązuje od 01.05.2023 r.
Wersja 3



INSTRUKCJA UŻYWANIA


Easy Walk® ECO AFO

Dynamiczna orteza na opadającą stopę

Produkt

Eco (art. AFO10E) to orteza ze wstępnie impregnowanego włókna węglowego z serii ortez stawu skokowego zapobiegających opadaniu stopy (AFO) Easy Walk®, opracowanych i produkowanych przez Ortho Baltic.

Stopień opadania stopy

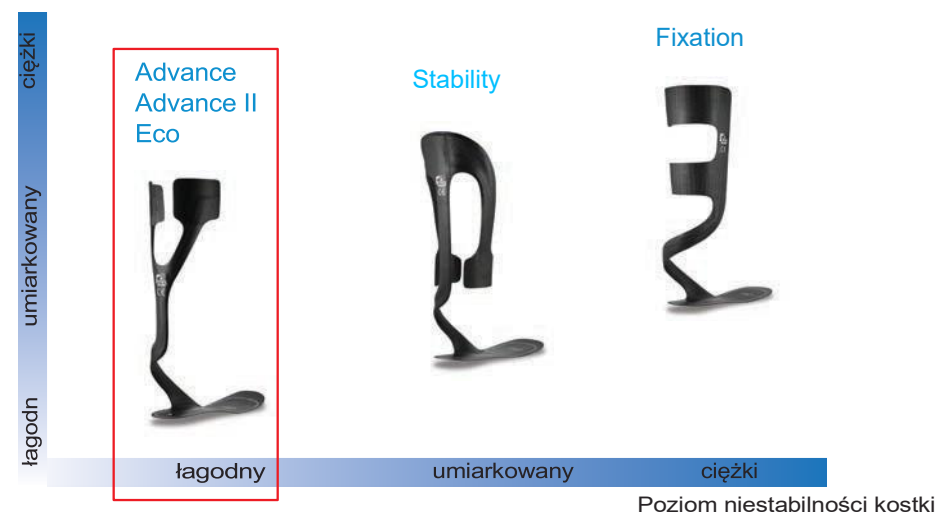

Poz. noga lewa	Poz. noga prawa	Rozmiar	Rozmiar obuwia	Wysokość [cm]
AFO10E=LXS	AFO10E=RXS	XS	34-36	33
AFO10E=LS	AFO10E=RS	S	36-39	35
AFO10E=LM	AFO10E=RM	M	39-42	36
AFO10E=LL	AFO10E=RL	L	42-45	37
AFO10E=LXL	AFO10E=RXL	XL	45-47	39



**Dopasowanie produktu może wykonać wyłącznie
wykwalifikowany specjalista w zakresie ortotyki.**