

Producent/Manufacturer:
mdh Sp. z o.o.
ul. Maratońska 104, 94-007 Łódź
Serwis tel. 605 553 424
tel. +48 42 674 83 84,
www.qmedbymeira.pl



KARTA GWARANCYJNA



Nazwa produktu:

Numer serii/partii/LOT (podany na wyrobie)

Data sprzedaży:

stempel sprzedającego

podpis sprzedającego

Lp.	Opis powstałego uszkodzenia, wady	Pieczęć Data, podpis
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Instrukcja używania Instructions for use



Producent / Manufacturer:

 MDH Sp. z o.o.
ul. Maratońska 104
94-007 Łódź
tel. +48 42 674 83 84
fax. +48 42 636 52 21
www.qmedbymeira.pl

Wydanie: 27.09.2022
Edition: 27.09.2022



PL

APARAT STACKA

EN

STACK APPARATUS

NUMER KATALOGOWY / CATALOGUE NUMBER / KATALOGNUMBER: DRQF3A

PL

EN

Opis produktu / Product characteristics

Lekka, higieniczna orteza palcowa ręki z szyną naparstkową do natychmiastowego zastosowania. Skuteczna w terapii urazów palców ręki. Kolor cielisty.

Lightweight hygienic finger orthosis with thumb splint for immediate use. Effective in treatment of finger injuries. Flesh-coloured.

Wskazania / Indications

Unieruchomienie w stawach międzypaliczkowych dalszych palców ręki, uszkodzenie prostownika palca, złamania awulsyjne, złamania kości paliczków dalszych.

Immobilization of distal interphalangeal joints, finger extensor injury, avulsion fracture, distal phalanx fractures.

Przeciwwskazania / Contraindications

Uszkodzenia i urazy w okolicy poniżej części dalszej paliczka, otwarte rany okolicy obejmującej stabilizację.

Lesions and injuries below the distal phalanx area, open wounds in the immobilization site.

Sposób użycia / Usage

Po dopasowaniu odpowiedniego rozmiaru wsuwamy ortezę na palec (otwartą częścią na paznokieć), następnie unieruchamiamy plasterem bez opatrunku (nie dołączony do ortozy).

After choosing the proper size, slide the splint onto a finger (the open part onto the nail), then immobilize with a sticking plaster without a dressing (not included).

Konserwacja / Maintenance

Do czyszczenia użyć ciepłej wody z delikatnym środkiem myjącym. Przechowywać z daleka od źródeł ciepła.

Clean with warm water and a mild washing agent. Keep away from heat sources.

OSTATECZNĄ DECYZJĘ DOTYCZĄCĄ ZASTOSOWANIA I WYBORU ZAOPATRZENIA PODEJMUJE LEKARZ SPECJALISTA

THE FINAL APPLICATION DECISION AND THE CHOICE OF SUPPLIES SHOULD BE MADE BY A SPECIALIST PHYSICIAN.

Objaśnienie zastosowanych symboli: / Description of symbols used:












	Producent Manufacturer
	Data produkcji Date of manufacture
	Numer serii/partii Lot/batch number
	Ostrzeżenie Warning
	Zajrzyj do instrukcji używania Refer to the instructions for use
	Chronić przed wilgocią Protect against moisture
	Chronić przed światłem słonecznym Protect against sunlight
	Numer katalogowy Catalogue number
	Wyrób medyczny Medical device
	Zgodność z Rozporządzeniem UE 2017/745 Compliant with Regulation (EU) 2017/745
	Zaleca się krótkie i dokładne pranie ręczne w 30 ° C, nie używać wybielacza, nie prasować, nie czyścić chemicznie, nie używać odplamiaczy zawierających rozpuszczalnik, nie używać suszarki bębnowej Recommended to wash briefly and thoroughly by hand at 30 °C, do not use bleach, do not iron, do not dry-clean, do not use stain removers containing solvent, do not use tumble dryer

Tabela rozmiarów / Size

Rozmiar / Size	2	3	4	5	5,5	6	7
Obwód palca w stawie międzypaliczkowym dalszym (cm) / Finger circumference in distal interphalangeal joint (cm)	5,5-6,0	6,0-6,5	6,5-7,0	7,5-8,0	8,5-9,0	9,5-10	10,5-11



WARUNKI GWARANCJI

- Gwarancja dotyczy wyłącznie produktów ortopedycznych wprowadzonych do obrotu, oferowanych i dostarczonych przez mdh, na terytorium Polski.
- Firma mdh wykona obowiązki wynikające z gwarancji w terminie 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego gwaranta, a w wyjątkowych wypadkach i po poinformowaniu reklamującego w terminie 30 dni roboczych od daty przekazania rzeczy do mdh.
- Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu wydania kupującemu wyrobu medycznego i jest równy połowie okresu użytkowania określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia (Dz. U. 2019 poz. 1267 z późn. zm.) dla danego wyrobu i 12 miesięcy gwarancji dla wyrobów sprzedawanych poza refundacją.
- Gwarancja jest ważna, gdy dostarczono:
 - wypełnioną kartę gwarancyjną,
 - dokument potwierdzający zakup przedmiotu,
 - produkt w oryginalnym opakowaniu.
- Firma mdh zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych rzeczy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji.
- Gwarancja nie obejmuje przypadków, gdy:
 - produkt został uszkodzony lub zniszczony na skutek działania sił wyższych,
 - uszkodzenie spowodowane jest niewłaściwym użytkowaniem produktu, w szczególności: użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem, zaniedbaniem czynności regulacyjnych i bieżącej konserwacji w zakresie przewidzianym w instrukcji użytkowania,
 - produkt wykazuje jakiegokolwiek rodzaju uszkodzenia mechaniczne,
 - użytkownik w okresie gwarancji dokona samodzielnych napraw lub przeróbek,
 - reklamowany produkt nie spełnia podstawowych wymogów higienicznych,
 - reklamacja wynika z naturalnego zużycia się produktu lub jego części np. wytarcia tapicerki, zużycie części ruchomych itp.
- Transport produktów reklamacyjnych odbywa się na koszt mdh Sp. z o. o. poprzez firmę spedycyjną wyznaczoną w każdym przypadku przez mdh. Spedycja (transport) przedmiotu odbywa się TYLKO PO UZGODNIENIU telefonicznym lub faksem z pracownikiem mdh i na podstawie wystawionego przez pracownika mdh zlecenia spedycyjnego.
- Koszty przesyłki reklamowanego przedmiotu wysłane bez uzgodnienia z firmą mdh ponosi nadawca.
- Adres serwisu: mdh Sp. z o.o. ul. Maratońska 104, 94-007, Łódź.
- Firma mdh ponosi odpowiedzialność w zakresie przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy od chwili jej przyjęcia, do jej odebrania przez uprawnionego z gwarancji.
- Kosztem transportu rzeczy zostanie obciążony nadawca w przypadku gdy reklamacja była oczywiście bezzasadna.
- Roszczenia dotyczące wszelkiego rodzaju szkód i strat, spowodowane przez produkt na skutek jego niewłaściwego użytkowania, w szczególności użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem są wyłączone.